

Bedienungsanleitung E-Joëlette

Unsere E-Joëlette

Der elektrisch unterstützte Geländerollstuhl E-Joëlette steht im Naturparkzentrum bereit und kann nach Voranmeldung von Wandergruppen mit mobilitätseingeschränkten Personen ausgeliehen werden, um diesen einen Zugang in die Natur zu ermöglichen.

Jede Besuchergruppe bekommt vor Ort zusätzlich eine Einweisung, in der die wichtigsten Funktionen des Geräts erklärt werden.

Vor dem Benutzen des Rollstuhls müssen die Benutzer die Kenntnisnahme der Nutzungsbedingungen bestätigen.

Für das Ausleihen der E-Joëlette gilt:

- nur nach Voranmeldung
- nur innerhalb der Öffnungszeiten
- Bitte Kopie des Personalausweises mitbringen!
- Benutzung geschieht auf eigene Gefahr

Kosten:

Die Inanspruchnahme der E-Joëlette ist kostenlos, wir freuen uns aber über eine Spende.

Benutzerinformation: Wandern mit der E-Joëlette

Was genau ist die E-Joëlette?

Unsere E-Joëlette ist ein **einrädiger elektrisch unterstützter Geländerollstuhl**, im Prinzip eine Kombination aus einer Schubkarre und einer Sänfte. Sie ermöglicht **Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung**, mit Hilfe von 3 Begleitern einen Ausflug bzw. eine **Wanderung** auf einem Fußpfad in umwegsamen Gelände zu unternehmen.

Wie bereite ich mich für einen Ausflug mit der E-Joëlette vor?

Eine gute **Vorbereitung** ist wichtig, um nicht unerwartet während der Wanderung vor Problemen zu stehen! Hierfür gilt:



Achtung: Jede Strecke muss zuvor sorgfältig geplant werden, um eventuelle Schwierigkeiten abschätzen zu können. Bei Fragen oder Beratungswunsch sprechen Sie uns gerne per E-Mail oder persönlich im Naturparkzentrum an.

- die Batterie-Reichweite beträgt - je nach Steigung - **zwischen 3 und 5 Stunden (der Akku ist bei Ausleihe voll geladen)**
- achten Sie auf **Hindernisse, Bodenbeschaffenheit und Wegbreite** (es entstehen sonst herausfordernde oder unüberwindbare Situationen), oftmals erkennt ein Fußgänger sie nicht gleich als solche!
- die E-Joëlette kann **Wege** passieren, die **auch mit einem Fahrrad** machbar sind
- man benötigt eine gewisses **technisches Geschick** für das Überwinden von z.B. Wurzeln, Steinen oder Stufen
- immer darauf achten, dass die E-Joëlette im **Gleichgewicht** bleibt
- trotz elektrischer Unterstützung benötigen die Begleitpersonen eine gewisse **Kraft und Kondition** (Gewicht E-Joëlette ohne Passagier: 38 kg, Anheben mit Person muss möglich sein)
- das **Gewicht des Passagiers** sollte **nicht** wesentlich **höher** sein als das der **hinteren Begleitperson**



Achtung: Steigungen und Steine erschweren (trotz elektrischer Unterstützung) den Betrieb der E-Joëlette! So kann z.B. ein geschotterter Aufstieg bei starker Steigung fast unüberwindbar werden. Ebenso kann Nässe zum Problem werden, da die E-Joëlette dann wegrutschen könnte.

Wie viele Personen benötige ich für die E-Joëlette?

Für einen Ausflug mit unserer E-Joëlette sind mindestens **3 Begleitpersonen notwendig**. Bitte beachten Sie hierbei das Verhältnis der Strecke zum Körpergewicht der zu transportierenden Person. Von Vorteil kann eine **kleine Wandergruppe** sein, da so die Möglichkeit besteht, sich beim Transportieren **abzuwechseln**.

Aufgabe der hinteren Begleitperson:

- der **Sessel** des Passagiers muss **immer horizontal** bleiben (Gewicht auf das Rad verlagern)
- bei Steigungen **in Laufrichtung schieben** (nicht nach oben drücken!)
- bei Bergabfahrten **bremsen** (rechter Handhebel)

 **Achtung:** Die Hände sollten nicht hinter den Griffen platziert werden! Es besteht eine Gefahr für den Passagier, da das Gleichgewicht erschwert wird! Kontrollieren Sie vor Fahrtbeginn die Bremse!

Aufgabe der vorderen Begleitperson:

- **Sicherheit** bieten
- Unterstützung bei der **Balance**
- **Hilfe beim Antrieb**, besonders auch bei Steigungen, ohne das Gleichgewicht zu gefährden
- sie **wählt den Weg** und achtet auf die **Befahrbarkeit**
- bei **Bergabfahrten** muss sie das **Gewicht halten** können. E-Joëlette nicht nach unten neigen!
- trägt ein „Zuggeschirr“, das vor der Brust getragen und hinten über Kreuz an den Hebearmen befestigt wird

 **Achtung:** Rucksäcke können sich verhaken!

Aufgabe der Dritten Begleitperson:

- **sichert** die E-Joëlette bei schwierigen Passagen
- dient als **Austauschperson**, wenn einer der Begleiter eine Pause benötigt
- **unterstützt vordere Begleitperson** beim Ziehen (weiterer Gurt möglich, Tandemlösung, oder ohne Gurt seitlich)
- **öffnet** evtl. **Schranken** oder Tore
- **hilft** dem Passagier

Platznehmen des Passagiers:

- E-Joëlette in **Abstellposition** bringen
- **eine Person** sichert die E-Joëlette und **verhindert ein Umfallen**
- **anderer Begleiter hilft dem Passagier** in den Sessel
- die **Fußhalter** bis zum Anschlag **hochfahren**, beim **Einsteigen nicht auf ihn treten**
- Passagier **anschnallen**, Personen die sich nur schwer halten können **zusätzlichen Gurt an den Schultern** anlegen
- **Kopfstütze** einstellen und fixieren
- evtl. dem Passagier einen **Helm aufziehen** (muss selbst mitgebracht werden)

Beachten Sie bitte, dass Hindernisse, die für den Fußgänger gar nicht als solche wahrgenommen werden, für die E-Joëlette herausfordernd oder sogar unüberwindbar sein können! Achten Sie hierbei nicht nur auf die **Bodenbeschaffenheit**, sondern auch auf die **Wegbreite** und evtl. **eng zusammenstehende Bäume**.

Orientieren kann man sich gut daran, dass der **Geländerollstuhl** die **Wege passieren** kann, die **auch mit einem Fahrrad machbar** sind. Ebenso wie beim Fahrrad benötigen Sie für das Überwinden von z.B. Wurzeln, Steinen oder Stufen ein **gewisses technisches Geschick** und **Kondition**. Achten Sie dabei darauf, dass die **E-Joëlette immer im Gleichgewicht** steht.



Auch wenn die E-Joëlette elektrisch unterstützt wird, sind Kraft und Ausdauer bei den Begleitpersonen notwendig, um eine entspannte Wanderung zu erleben.

Wie bediene ich die E-Joëlette?

Schritt 1:

Die beiden vorderen Hebearme einstecken und mit der Sicherung fest fixieren



Schritt 2:

Den Akku einsetzen und gegen Diebstahl sicher abschließen



Akku auf „An“ stellen



Schritt 3:

Damit der Sitz beim Aufklappen des Rades **verriegelt**, **Raststift** in **vertikale** Position bringen. Zum späteren **Öffnen** zu sich heranziehen und **horizontal** stellen. Raststift befindet sich vorne, unterhalb des Sitzes in Fahrtrichtung links.



verriegelt → vertikal

→ Sitz kann einrasten



offen → horizontal

→ Sitzverriegelung öffnet sich,
Joëlette kann in Parkposition
gebracht werden

Schritt 4:

Passagier hat wie beschrieben Platz genommen



Schritt 5:

Die hintere Begleitperson stellt sich den **Schiebegriff** in die passende **Position** ein. Dies passiert mit Hilfe des **linken Hebels**.



Rechts befinden sich die **Bremse** und das **Gas**.



Bremse



Gas
(E-Unterstützung)

⚠ Achtung: es ist **unbedingt notwendig**, die **Bremse zu betätigen**, bis die Joëlette **komplett aufgestellt** ist!

Schritt 6:

Der hintere Begleiter richtet sich auf, tritt leicht gegen den Auflagepunkt an der Achse des Rades, welches nun Bodenkontakt hat. Gleichzeitig wird die E-Joëlette vorne angehoben und nach hinten geschoben, bis das Rad einrastet.



Schritt 7:

Die vordere Person legt das Zuggeschirr an. Nun ist die E-Joëlette einsatzbereit und der Ausflug kann beginnen.



Abstellen der E-Joëlette (bei z.B. einer Pause)

Achten Sie auf einen stabilen Untergrund. Die vordere Begleitperson öffnet den Raststift (horizontale Einstellung). **Dann betätigen Sie die Bremse.** Der hintere Begleiter schiebt nun langsam das Rad nach vorne, bis es einknickt und die E-Joëlette sicher am Boden steht.



Schritt 3



Schritt 2



Schritt 1

Nun ist der Geländerollstuhl gesichert und kann losgelassen werden (trotzdem immer im Auge behalten).

Kontrolle Stellung des Rades



Ruheposition



Fahrposition

Vor der Weiterfahrt immer Raststift kontrollieren (vertikale Stellung)!

Durch leichte Anhebung des Rades kontrollieren, ob der Sitz verriegelt ist.

Sonstige Informationen

Sollten während des Ausflugs Schrauben nicht fest genug sitzen, finden Sie in der kleinen Tasche das nötige **Werkzeug**.



Die Weidezäune im Dörnberg-Gebiet sind teils verschlossen. Hierfür benötigt man einen „**Weidezaun-Schlüssel**“. Dieser wird im Naturparkzentrum mit ausgeliehen und hängt griffbereit an der E-Joëlette.



Bei Fragen oder Problemen während des Ausflugs wenden Sie sich bitte an uns!

Ihr Naturparkzentrum Habichtswald

Tel. 05606-533266